



Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

POSIBILIDAD DE FALLO DE LAS BARRAS TELESCÓPICAS DE SUJECIÓN DEL RESPALDO EN DETERMINADAS SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PERMOBIL

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2018

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD
Referencia: PS, 18 /2018

La AEMPS informa del posible fallo de las barras telescópicas de soporte del respaldo en determinadas sillas de ruedas eléctricas Permobil con asiento PS, fabricadas por Permobil AB, Suecia, lo que puede ocasionar la caída hacia atrás del usuario.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de las autoridades sanitarias de Suecia, de un posible fallo en las sillas de ruedas eléctricas Permobil M300, C300 y C350 con asientos PS, fabricadas por Permobil AB, Suecia y distribuidas entre enero de 2011 y diciembre de 2013.

La empresa va a proceder a la reparación de estas sillas de ruedas debido a un posible fallo de las barras telescópicas de sujeción del respaldo de la silla.

Este producto se distribuye en España por las empresas:

- FPL Mobility, sita en Avenida Ciudad de la Habana 7, 47014 Valladolid.
- Mobiltec Iberia, sita en Calle Costanilla del Olivar 6, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

SITUACIÓN ACTUAL

La empresa ha remitido una nota de aviso para informar del problema detectado a los distribuidores y ortopedias a las que han suministrado los productos afectados en nuestro país, en la que se incluyen las recomendaciones y actuaciones a seguir.



PRODUCTOS AFECTADOS

Sillas de ruedas eléctricas Permobil, modelos:

- M300 PS
- C300 PS
- C350 PS

distribuidas entre enero de 2011 y diciembre de 2013, y fabricadas por Permobil AB, Suecia.

En el [Anexo I](#) se indican los números de serie de cada modelo afectados en España.

RECOMENDACIONES

a) Ortopedias

1. Si ha vendido o ha entregado a pacientes o centros sanitarios sillas de ruedas eléctricas Permobil de los modelos y números de serie indicados en el [Anexo I](#), intente identificarlos para llevar a cabo la reparación.
2. Si dispone en su establecimiento de sillas de ruedas eléctricas Permobil de los modelos y números de serie indicados en el [Anexo I](#), solicite a su distribuidor la reparación de las mismas.

b) Pacientes y Centros Sanitarios

1. Si dispone de sillas de ruedas eléctricas Permobil compruebe si se corresponden con las referencias y números de serie indicados en el [Anexo I](#). En caso de que así sea, contacte con la ortopedia en la que adquirió el producto o con la empresa que se lo suministró para su reparación.
2. Si su silla no se corresponde con los modelos y números de serie mencionados en el [Anexo I](#), no le afecta esta nota informativa.



DATOS DEL DISTRIBUIDOR

FPL Mobility

Avenida Ciudad de la Habana 7

47014 Valladolid

+34 983 141 610

<http://fplmobility.com/>

Mobilitec Iberia

Calle Costanilla del Olivar 6

Pozuelo de Alarcón, Madrid

+34 918 278 055

<http://www.mobilitec.es/>



ANEXO I

NÚMEROS DE SERIE DE LAS SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PERMOBIL M300, C300 y C350 CON ASIENTOS PS, DISTRIBUIDOS ENTRE ENERO DE 2011 Y DICIEMBRE DE 2013, FABRICADAS POR PERMOBIL AB, SUECIA.

Sillas de ruedas eléctricas Permobil distribuidas por Mobiltec Iberia

Número de serie	Chasis	Asiento
43101580	C350	PS
43102090	C350	PS
43102091	C350	PS
43703421	C300	PS
43703588	C300	PS
43704169	C300	PS

Sillas de ruedas eléctricas Permobil distribuidas por FPL Mobility

Números de serie	Chasis	Asiento
43101705	C350	PS
43101780	C350	PS